



Инструкция по применению

МОНТАВИТ ГЕЛЬ

Гель увлажняющий вагинальный

Регистрационный номер: № ФСЗ 2011/10065 от 28.02.2014

Состав на 1000 мг:

Гидроксиэтилцеллюлоза - 23 мг, глицерин – 100 мг,
очищенная вода - 876,9 мг, хлоргексидина дигидрохлорид - 0,1 мг.

Свойства:

Монтавит Гель представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы; заменяет естественную слизь, оказывая увлажняющее и смазывающее действие при равномерном распределении на стенках влагалища. Монтавит Гель хорошо переносится слизистой оболочкой, не содержит жиров и совместим с латексом. Безупречное качество геля гарантируется проведением химического и бактериологического контроля.

Область применения:

Состояния, когда нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования. Это может происходить во время менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм). Все вышеперечисленное может приводить к появлению сухости слизистой оболочки влагалища, появлению на ней микротрещин. Это вызывает дискомфорт, чувство жжения, нарушения полового акта в виде затруднения проникновения во влагалище, напряжения, неприятных болезненных ощущений. В некоторых случаях целесообразно применение Монтавит Гель при проведении гинекологических вмешательств, связанных с введением инструментов во влагалище.

Побочные эффекты:

Монтавит Гель прекрасно переносится, обладая исключительно хорошим смазывающим действием; не оказывает отрицательного действия на слизистую оболочку влагалища и на половой член.

Совместимость с другими препаратами:

Монтавит Гель нейтрален и хорошо совместим с водорастворимыми веществами; может являться основой для доставки и распределения этих веществ на слизистой оболочке влагалища.

Предупреждения:

Монтавит Гель не является противозачаточным средством, может использоваться с презервативами, легко смывается, не оставляет пятен.

Способ применения и дозы:

Перед осуществлением полового акта нанести небольшое количество Монтавит Гель на преддверие влагалища. Для борьбы с сухостью влагалища доза и частота применения определяется женщиной индивидуально.

Форма выпуска:

- гигиенический одноразовый тюбик 6,5 мл x 5
- тубы по 20 г многократного использования
- тубы по 50 г многократного использования

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Хранить при комнатной температуре.

Срок годности:

60 месяцев.

Фирма-производитель: Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х. Абзам, Австрия

Претензии потребителей направлять по адресу:
представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х.»

107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая д.22, стр.3
Тел. (495) 781-71-08



Montavit

МОНТАВИТ ГЕЛЬ

Гель увлажняющий вагинальный

03/14-106 402



1. Korrektur · 17. März 2014 · Format: 108 x 150 mm
Farben: Pink 226c, Schwarz · Schriftgröße: 8,5 Punkt
Gl Gleitgelen RU 106402_0314